

NeilMed® Lindring af symptomer i næsevejene og bihulerne fra allergier, forkølelse og høfeber

Hvad er fordelene ved NeilMed® SINUS RINSE™?

En vis mængde slimproduktion i næsen og bihulerne er normal. Allergier og infektioner medfører ekstra slimproduktion. Dette får næsen til at løbe. Når du udfører en næseudskylning med NeilMed Sinus Rinse, skylles disse ekstra slim og allergi- og infektionsfremmende irritanter såsom bakterier, pollen og støvpartikler bort, og mindsker derved betændelsen i slimhinderne. Normal, ønskelig slim vil bedre være i stand til at bekæmpe infektioner og allergier.

Indeholder ingen medicin

Indeholder ingen konserveringsmidler



En 240 ml flaske, 60 forudblandede poser
Én gang om dagen (nok til 60 dage)

120 forudblandede poser.
Én gang om dagen (nok til 120 dage)

Hjælper med at lindre:

- Symptomer i næsevejene fra allergier og høfeber
- Symptomer i næsevejene fra forkølelse og influenza
- Trykken i bihulerne og tilstoppet næse
- Allergier fra støv på arbejde eller i hjemmet, forurening, allergier over for kæledyr, græs, pollen, røg osv.
- Postnasalt dryp
- Symptomer i næsevejene hos CPAP-brugere med søvnapnø
- Symptomer med tykt slim i næsevejene fra cystisk fibrose og immotile cilia syndrom



Hvordan udføres en udskylning med NeilMed® SINUS RINSE™?

For at udføre en rigtig næseudskylning har du brug for en stor portion saltvandsopløsning, som sprøjtes ind ved lavt tryk. Det er nødvendigt med ialt 120-240 ml til at skylle begge sider af næsepassagerne. Når du klemmer opløsningen op i den ene næsepassage, skal den fortsætte med at flyde opad, op over næseskillevæggen, og dernæst flyde ned gennem den anden næsepassage. Dette sikrer, at allergener, irritanter, ekstra slim og andet materiale i opløsningens vej fjernes fra næsepassagen. Før denne flowcyklus forekommer, har du ikke opnået en grundig udskylning.

Naturlig lindring hele året

P2834

Fås på alle apoteker landet over.
Hvis du ikke finder det på dit lokale apotek, kan apotekeren bestille det gennem distributøren

Pharma Vest®

